

PROTECH™ EMERY POWDER

PULIDO SUPERIOR DE ACRÍLICOS Y RESINAS

VENTAJAS SOBRE LA PIEDRA PÓMEZ:

- **Resultados superiores** - GRAN SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO FINAL POR EL TÉCNICO, MÉDICO Y PACIENTE.
- **Pulido rápido** – MENOS TIEMPO APLICADO AL PULIDO DA COMO RESULTADO MENOS COSTO DE MANO DE OBRA, POR LO TANTO UN MAYOR MARGEN DE BENEFICIO.
- **Duradero y rentable** - LASTING LONGER THEN PUMICE, THE PRODUCT COSTS NO MORE THEN CURRENT MATERIALS.
- **Inodoro** - YA NO TIENEN QUE LIDIAR CON EL MAL OLOR DE LA PIEDRA PÓMEZ.
- **Consistente** – LOS MISMOS EXCELENTES RESULTADOS SIEMPRE.

NO REQUIERE NINGÚN APRENDIZAJE ADICIONAL YA QUE EL PROCEDIMIENTO Y EL EQUIPO SON LOS MISMOS QUE SE UTILIZA CON LA PIEDRA PÓMEZ.

ES NATURAL Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. SE UTILIZA PARA EL PULIDO DE PRÓTESIS DENTALES, **PARTIALS**, PUENTES PROVISIONALES Y CUALQUIER OTRA PRÓTESIS DE RESINA.

INSTRUCCIONES:

MEZCLAR 8 ½ OZ. DE AGUA CON 1 LIBRA DE EMERY POWDER PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS.

ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO CONTIENE SÍLICE CRISTALINA. CUANDO SE VIERTE EL POLVO, USE UNA MASCARILLA. LA RESPIRACIÓN PROLONGADA DE CONCENTRACIONES EXCESIVAS DE POLVO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR. NO INHALAR EL POLVO. EN CASO DE CONTAMINACIÓN, UTILIZAR UN RESPIRADOR COMO A 3M TM, 9900 O MSA TM ULTRA-TWIN CON FILTRO H.

EVITAR EL CONTACTO DEL POLVO CON LOS OJOS. SI OCURRE EL CONTACTO, ENJUAGUE BIEN CON AGUA FRÍA. SI LA IRRITACIÓN PERSISTE CONSULTE A UN MÉDICO.