

ProTech™ BOIL-OUT COMPOUND

ASEGURA LA ELIMINACIÓN DE LA CERA EN PROFUNDIDAD:

MOLDES COMPLETOS DE DENTADURA
MOLDES PARCIALES DE DENTADURA
MOLDES DE CORONA Y DE PUENTES
ETC.

MANTENGA EL TANQUE DE HERVIR LIMPIO Y LIBRE DE ACUMULACIÓN DE CERA.

INSTRUCCIONES

MIX ONE (1) HEAPING TABLESPOON OF BOIL-OUT COMPUESTO POR UN CUARTO DE GALÓN DE AGUA HIRVIENDO. HIerva CERA COMO DE COSTUMBRE. ENJUAGUE CON AGUA CALIENTE Y LIMPIA PARA ELIMINAR CUALQUIER RESTO.

ADVERTENCIA

NO SE RECOMIENDA PROTECH™ BOIL-OUT COMPOUND PARA FRASCOS DE ALUMINIO. DEBIDO A LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS COMPUESTOS, LOS PRODUCTOS DE ALUMINIO SE CUBRIRÁN CON UN REVESTIMIENTO NEGRO DE ÓXIDO DE ALUMINIO, QUE PUEDEN SER ELIMINADOS POR PULIDO.